

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S6035

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

- Конструкция бандажа на коленный сустав обеспечивает регулируемую посадку и не ограничивает движения.
- Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность и защищают коленную чашечку.
- Усиленная стабилизация коленной чашечки предотвращает смещение.
- Сохранение тепла и компрессия снижают риск растяжений или травм.
- Облегающая конструкция и регулируемая застежка-липучка гарантируют комфортную посадку. Способствует легкости в применении и оказывает максимальную поддержку.
- Дышащий аэропрен с внутренним слоем из натурального хлопка для комфорта обеспечивает согревание и равномерную компрессию ослабленного или поврежденного большой нагрузке колена.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
- Подходит для левой и правой ноги.

Показания к применению:

Стабилизирующий бандаж обеспечивает динамическую поддержку и регулируемую компрессию колennого сустава, не ограничивая его подвижность. Отверстие и упругий валик-кольцо фиксируют коленную чашечку, и гарантируют дополнительную поддержку и общую стабильность колennого сустава. Он помогает распределить нагрузку на сустав во время движений, облегчая боли при артрите и повреждениях мениска.

Воспалительные и дегенеративные заболевания колennого сустава (начальные стадии, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы), если не противопоказано согревание сустава. Профилактика травм колennого сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом. Хроническая нестабильность (привычный подвывих) надколенника. Ушибы, растяжения связок колennого сустава в подостром периоде, а также в период средне- и позднесрочной реабилитации после снятия гипсовой повязки.


- Рекомендуются при артрите колennого сустава, хронических болях и ограниченной подвижности.
- Помогает при растяжениях, нестабильности и смещении надколенника.
- Обеспечивает поддержку и стабилизирует травмированное, слабое или воспаленное колено во время выполнения упражнений.
- Способствует процессу заживления, не ограничивая подвижность колennых суставов и мышц.

Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват колена, см	34 - 46	± 1,0 см

Схема надевания:

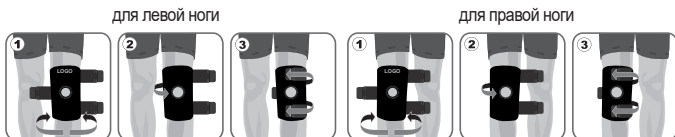

Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: аэропрен-65%, хлопок-15%, полиэстер-20%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

Medtex Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com