

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S6040

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ВЯЗАНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

- Обеспечивает надежную поддержку и защиту коленного сустава при занятиях спортом.
- Сохраняет тепло и компрессию, снижает риск растяжений или травм.
- Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
- Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование.
- Подходит для левой и правой ноги.

Показания к применению:

Бандаж обеспечивает динамическую поддержку и регулируемую компрессию коленного сустава, не ограничивая его подвижность. Помогает распределить нагрузку на сустав во время движений, облегчая боли при артрите и повреждениях мениска.

Воспалительные и дегенеративные заболевания коленного сустава (начальные стадии, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы), если не противопоказано согревание сустава. Профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом. Хроническая нестабильность (привычный подвывих) надколенника. Ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром периоде, а также в период средне- и позднесрочной реабилитации после снятия гипсовой повязки.

- Рекомендуется при артрите коленного сустава, хронических болях и ограниченной подвижности.
- Помогает при растяжениях, нестабильности и смещении надколенника.
- Обеспечивает поддержку и стабилизирует травмированное, слабое или воспаленное колено во время выполнения упражнений.
- Способствует процессу заживления, не ограничивая подвижность коленных суставов и мышц.


Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.


Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват локтя, см	24 - 30	± 1,0 см

Схема надевания:

для левой ноги

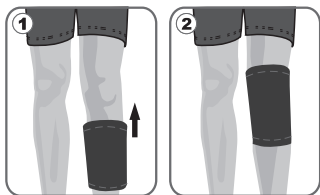

для правой ноги

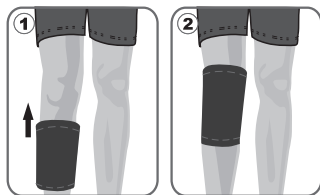

Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: капрон-60%, латекс-30%, полиэстер-10%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово, ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com

