

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**APT. S6058**

# СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С 4 СПИРАЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

- Конструкция бандажа на коленный сустав обеспечивает регулируемую посадку и не ограничивает движения.
- Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность и защищают коленную чашечку.
- Усиленная стабилизация коленной чашечки предотвращает смещение.
- Две медиально-латеральных спиральных съемных ребра жесткости с обеих сторон обеспечивают дополнительную поддержку и стабильность.
- Сохранение тепла и компрессия снижают риск растяжений или травм.
- Облегающая конструкция и регулируемые ремни обеспечивают стабильность и предотвращают сползание бандажа. Способствует легкости в применении и оказывает максимальную поддержку.
- Дышащий аэропрен с внутренним слоем из натурального хлопка для комфорта обеспечивает согревание и равномерную компрессию ослабленного или подверженного большой нагрузке колена.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
- Подходит для левой и правой ноги.

### Показания к применению:

Стабилизирующий бандаж с 4 спиральными ребрами жесткости обеспечивает динамическую поддержку и регулируемую компрессию коленного сустава, не ограничивая его подвижность. Отверстие и упругий валик-кольцо фиксируют коленную чашечку, и гарантируют дополнительную поддержку и общую стабильность коленного сустава. Он помогает распределить нагрузку на сустав во время движений, облегчая боли при артрите и повреждениях мениска.


- Воспалительные и дегенеративные заболевания коленного сустава (начальные стадии артрита, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии), если не противопоказано согревание сустава. Профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом. Хроническая нестабильность (привычный подвывих) надколенника. Ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром периоде, а также в период средне- и позднесрочной реабилитации после снятия гипсовой повязки.
- Рекомендуется при артрите коленного сустава, хронических болях и ограниченной подвижности.
  - Помогает при растяжениях, нестабильности и смещении надколенника.
  - Обеспечивает поддержку и стабилизирует травмированное, слабое или воспаленное колено во время выполнения упражнений.
  - Способствует процессу заживления, не ограничивая подвижность коленных суставов и мышц.

### Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват колена, см	30 - 43	± 1,0 см

### Схема надевания:

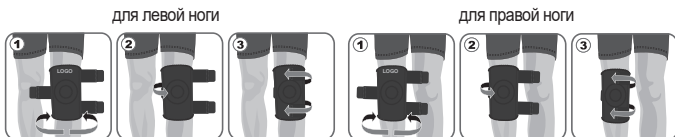

**Уход за изделием:** Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

**Меры предосторожности:** Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

**Состав:** аэропрен-60%, хлопок-15%, полиэстер-20%, латекс-5%, металлические спиральные ребра жесткости.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Размер:** универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,  
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch  
medpack-group.com, dr-frei.com