

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S8321

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

- Бандаж обеспечивает поддержку и облегчает боль при отеках и повреждениях локтя и напряженных мышц предплечья во время занятий.
- Минимизирует риск будущих травм и нестабильности.
- Обеспечивает компрессию ослабленного локтя при большой нагрузке.
- Разъемный дизайн и регулируемые застежки-липучки гарантируют комфортную посадку и стабилизацию во время занятий. Обеспечивает легкость в применении и максимальную поддержку.
- Специальная зона округлой формы усиливает давление на мышцы локтевого сустава.
- Аэропрен обеспечивает амортизацию ударов, динамическую компрессию и воздухопроницаемость во время длительного использования.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
- Подходит для левой и правой руки.

Показания к применению:

Бандаж обеспечивает регулируемую степень компрессии и поддержку локтевого сустава. Он помогает при повторяющихся спортивных травмах, таких как «локоть теннисиста» и «локоть гольфиста», ограничивая излишние движения внутренней и внешней сторон сустава. Также применяется для восстановления и во время реабилитации после операции, травмы или повреждения.

Бандаж обеспечивает поддержку и облегчает боль при отеках и повреждениях локтя и напряженных мышц предплечья во время занятий.

Помогает уменьшить боль из-за тендинита и бурсита.

Дышащий неопрен поддерживает тепло сустава для ускорения процесса заживления и оказывает микро массажное действие, которое улучшает кровообращение и уменьшает отек локтевого сустава.

Травмы, ушибы, растяжения связок локтевого сустава. Профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний локтевого сустава (артритов, тендинитов, тендовагинитов). Болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях локтевого сустава (артрозах и остеоартрозах). Профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав.

- Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
- Нижняя часть бандажа на предплечье дополнительно фиксируется лентой с застежкой-липучкой. Такая особенность конструкции предотвращает сползание бандажа во время носки и обеспечивает дополнительное массирующее воздействие на мышцы верхней трети предплечья
- Подходит для правой и левой руки

Противопоказания:


Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват локтя, см	24 - 30	± 1,0 см

Схема надевания:

для правой руки

для левой руки

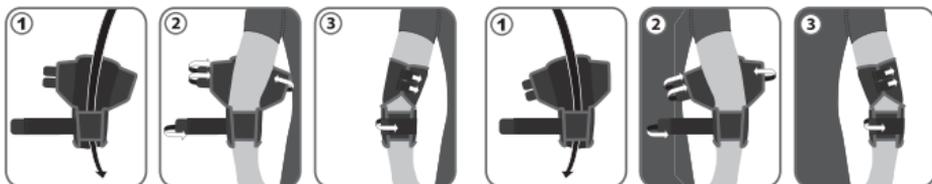

Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35°С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: аэропрен-60%, хлопок-15%, полиэстер-20%, латекс-5%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

Medtex Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово, ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com