

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**APT. S8322**

### БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ФИКСИРУЮЩИЙ (ЛОКОТЬ ТЕННИСИСТА/ГОЛЬФИСТА)

- Лечение и профилактика латеральных («локоть теннисиста») и медиальных («локоть гольфиста») эпикондилитов.
- Подушечка перераспределяет компрессию бандажа и нагрузки с латерального и медиального надмыщелков плечевой кости на сухожилия и к окружающим мягким тканям, оказывает массажное действие.
- Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
- Облегчает боль напряженных мышц в зоне предплечья во время занятий.
- Отличная фиксация и компрессия благодаря дополнительному жесткому ремню на лопучке.
- Простой дизайн, удобный для надевания без посторонней помощи.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
- Подходит для левой и правой руки.

#### Показания к применению:

Бандаж специально разработан для обеспечения динамической компрессии и поддержки мышц предплечья и локтевого сухожилия. Снижает вибрацию и напряжение на внутреннюю и внешнюю часть локтя, стабилизируя мышцы-сгибатели и разгибатели в зоне предплечья.

Подушечка, амортизирующая вибрации, гарантирует дополнительную защиту и поддержку во время занятий спортом и осуществления профессиональной деятельности.

Это полезно в случае «локтя теннисиста» или «локтя гольфиста», уменьшая раздражение сухожилия и чрезмерную перегрузку.

Бандаж фиксирует сухожилия мышц-сгибателей и разгибателей руки, перераспределяет нагрузку с латерального и медиального надмыщелков плечевой кости на сухожилия.



#### Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.




Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват локтя, см	21 - 34	± 1,0 см

#### Схема надевания:

для левой руки

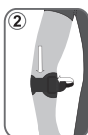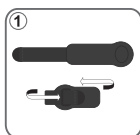

для правой руки

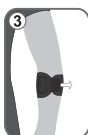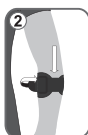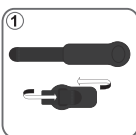

**Уход за изделием:** Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

**Меры предосторожности:** Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

**Состав:** аэропрен-65%, хлопок-15%, полиэстер-20%, пряжка-рамка пластиковая.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Размер:** универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,  
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch  
medpack-group.com, dr-frei.com

