

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**APT. S3041**

# БАНДАЖ НА ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ С УСИЛЕННЫМИ РЕМНЯМИ

- Бандаж на поясничный отдел обеспечивает поддержку мышц спины, и стабилизирует брюшное давление для более безопасной деятельности.
- Уменьшает нагрузку на позвонки и межпозвоночные диски.
- Аэропрен обеспечивает согревающее и микро массажное действие, не препятствуя дыхательной функции кожи.
- Коническая форма для удобной посадки.
- Два пластиковых ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в поясничном отделе.
- Усилен ремнями для регулировки степени компрессии.
- Съёмная массажная подушечка в нижней части бандажа стимулирует мышцы спины.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).

### Показания к применению:

Бандаж с усиленными ремнями и лентами предназначен для уменьшения нежелательных или чрезмерных движений нижней части спины. Рекомендуется при хронических болях в спине, а также во время выполнения повторяющихся упражнений.

Регулируемые ремни обеспечивают плотную и комфортную посадку бандажа, а съёмные вставки – массажное действие на поясницу во время занятий, что помогает при мышечных спазмах.


Применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря дышащему и гибкому материалу, а также пластиковым ребрам жесткости бандаж обеспечивает надежную поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.

### Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват талии, см	70 - 110	± 1,0 см

### Схема надевания:

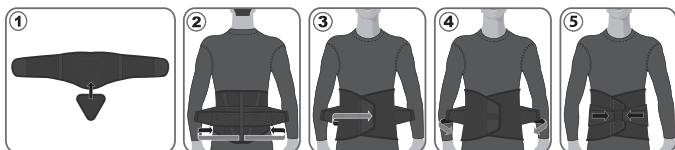

**Уход за изделием:** Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

**Меры предосторожности:** Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

**Состав:** аэропрен-50%, латекс-5%, хлопок-15%, полиэстер-25%, капрон -5%, ребра жесткости пластиковые, пелот.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Размер:** универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово, ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch medpack-group.com, dr-frei.com