

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S6010

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ РАЗЪЕМНЫЙ

- Лечение и профилактика тендовагинита, «колена прыгуна».
- Подушечка перераспределяет компрессию бандажа и нагрузки, оказывает массажное действие.
- Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
- Облегчает боль напряженных мышц во время занятий.
- Отличная фиксация и компрессия благодаря дополнительному жесткому ремню на липучке.
- Простой дизайн, удобный для надевания без посторонней помощи.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
- Подходит для левого и правого колена.

Показания к применению:

Бандаж специально разработан для обеспечения динамической компрессии и поддержки коленного сустава.

Подушечка, амортизирующая вибрации, гарантирует дополнительную защиту и поддержку во время занятий спортом и осуществления профессиональной деятельности.

Это полезно в случае «колена прыгуна», уменьшая раздражение сухожилия и чрезмерную перегрузку.

Бандаж устраняет нагрузку на область коленного сустава.

Рекомендуется при хронических перегрузках коленного сустава (спортивных, профессиональных), травмировании, плоскостопии, пателлофemorальном болевом синдроме, болезни Осгуд-Шлаттера.

Подкладка ортеза является анатомически правильной, благодаря чему сохраняет свое положение во время ходьбы.

Противопоказания:





Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват колена, см	30 - 43	± 1,0 см

Схема надевания:

для левой ноги

для правой ноги

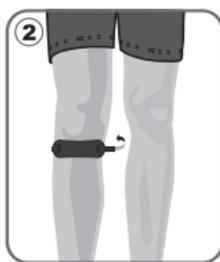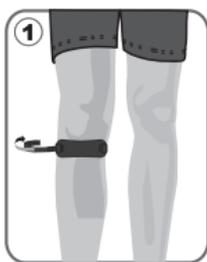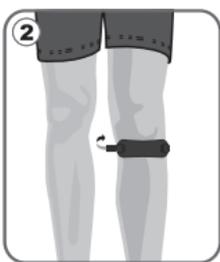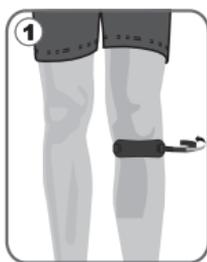

Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35°С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: аэропрен-60%, полиэстер-25%, хлопок-15%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com

