

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S7035

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

- Обеспечивает надежную поддержку и защиту голеностопного сустава при занятиях спортом.
- Сокращает риск возникновения травм, растяжений, разрывов и нестабильности.
- Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
- Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование.
- Подходит для левой и правой ноги.

Показания к применению:

Болевые синдромы при травмах и заболеваниях голеностопного сустава. Хронические воспаления сухожилий после травм и операций. Позднесрочная реабилитация после операций на суставе и в пяточной области. Профилактика растяжений и воспалительных заболеваний сустава при занятиях спортом.

- Крой бандажа создает динамичную компрессию, сохраняя полную свободу движений.
- Обеспечивает комфортную поддержку и компрессию для улучшения кровообращения, уменьшения боли, ускорения заживления и поддержания гибкости голеностопного сустава.


Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.


Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват голеностопа, см	24 - 30	± 1,0 см

Схема надевания:

для правой ноги

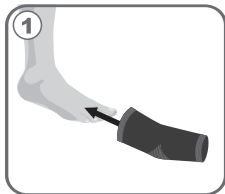

для левой ноги

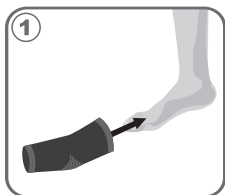

Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35°С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: капрон-60%, латекс-30%, полиэстер-10%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

Medtex Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово, ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com

