

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S8317

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

- Лечение и профилактика латеральных («локоть теннисиста») и медиальных («локоть гольфиста») эпикондилитов.
- Обеспечивает надежную поддержку и защиту локтевого сустава при занятиях спортом.
- Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
- Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование.
- Подходит для левой и правой руки.

Показания к применению:

Бандаж обеспечивает регулируемую степень компрессии и поддержку локтевого сустава. Он помогает при повторяющихся спортивных травмах, таких как «локоть теннисиста» и «локоть гольфиста», ограничивая излишние движения внутренней и внешней сторон сустава. Также применяется для восстановления и во время реабилитации после операции, травмы или повреждения.



Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.



Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват локтя, см	24 - 30	± 1,0 см

Схема надевания:

для правой руки

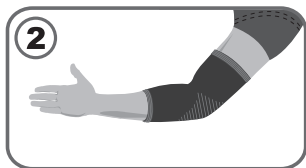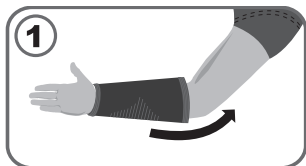

для левой руки

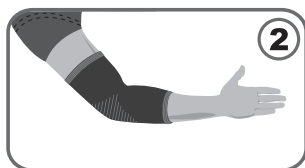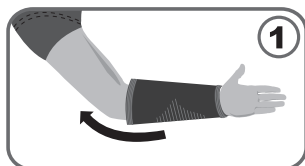

Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: капрон-60%, латекс-30%, полиэстер-10%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

■ Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com

